


Instructie urine-afname

HOW ARE YOU[®]

DIAGNOSTICS

DOE DE TEST

SCAN DE CODE VAN DE BUIS/CONTAINER OF VOER
DEZE HANDMATIG IN.

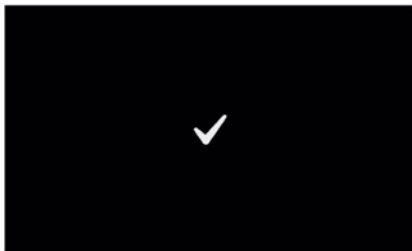

624HAYFY6J4TBC

SOA-TEST URINE - CHLAMYDIA & GONORROE

Introductie

U start een urine afname.

Kies een rustig moment en neem de tijd om de afname te doen. Deze test voert u uit door middel van een urine afname. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de afname uitvoert.

Als u eerder test dan de incubatietijd bestaat het risico dat de SOA niet wordt aangetroffen; u test dan vals-negatief. Wij raden u aan om de volledige incubatietijd af te wachten als u geen klachten ervaart.

1

Was uw handen



Was uw handen met warm water en zeep. Droog uw handen met een schone handdoek.

2


Vouw het urinebakje open



Neem het nog dichtgevouwen urinebakje en vouw deze open. Neem daarnaast het pipet.

3

Open het buisje

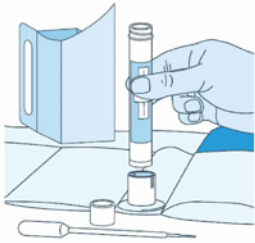

Ga aan tafel zitten. Open het buisje door aan de dop te draaien. Raak de (glimmende) bovenkant van de dop niet aan. Leg de dop naast het buisje. Plaats het buisje in de buishouder, zodat deze niet omvalt.

4

Doe de afname




Ga naar het toilet en urineer in het urinebakje tot deze in ieder geval voor de helft vol zit met uw urine.

Let op: vrouwen mogen de schaamlippen niet reinigen voordat ze het monster afnemen.

5

Vul het urinebuisje

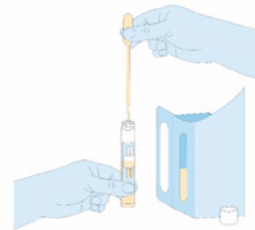


Vul het transportbuisje met urine uit het urinebakje totdat het buisje minimaal voor de helft vol is met urine; tussen de twee zwarte vulstreepjes. U kunt dit doen door gebruik te maken van de bijgeleverde wegwerppipet, of eventueel door het direct over te gieten.

Let op: zorg ervoor dat de urine niet te ver boven het bovenste vulstreepje uitkomt (bij te veel urine kunnen wij de analyse niet uitvoeren).

6

Sluit het buisje

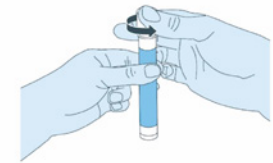

Doe het dopje op het buisje en sluit deze. Controleer of het buisje goed is gesloten.

7

Plaats het buisje in de SafetyBag



Plaats het buisje tussen de harde plastic delen van het lekvrije zakje (SafetyBag). Verwijder de plakstrip en sluit de SafetyBag.

8

Doe de SafetyBag in de retourenvelop



Doe de SafetyBag in de retourenvelop. Verwijder de plakstrip van de retourenvelop en sluit deze.

9

Verzend de envelop



Verzend de envelop zo snel mogelijk via de reguliere PostNL brievenbus.

[Klik hier](#) om de dichtstbijzijnde PostNL brievenbus te vinden.

U BENT KLAAR MET DE TEST



Ontvang en bekijk het resultaat bij 'Mijn testen'.